

Vertrieb und Technischer Support in Europa:

Jensen GmbH

Gustav-Werner-Straße 1

72555 Metzingen, Germany

0800-857 32 30 | +49 7123-92260

info@jensendental.de

www.jensendental.de | www.miyoworld.eu

Hergestellt von:

Chemichl AG

Landstrasse 114

9490 Vaduz, Liechtenstein

info@chemichl.com

www.chemichl.com



4365040523



QUICK START GUIDE deutsch

Für den perfekten Start.



! Vorbereitung | Verarbeitungshinweise

Vorbereitung


- Vor dem Auftragen der InSync | MiYO Glasurpaste muss die Oberfläche sauber und fettfrei sein.
- Sofern gewünscht kann die Oberfläche mit dem Sandstrahler 50/110 µm und 1,5 bar Druck gesäubert werden.

Verarbeitung

- Überschüssige Flüssigkeit **nicht** aus den Behältern gießen.
- InSync | MiYO Glasurpaste vor jeder Anwendung gut mit einem metallfreien Spatel durchmischen.
- Die Pasten dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Immer einen sauberen und trockenen Pinsel verwenden.

Lagerung und Entsorgung

- Trocken lagern.
- Kleine Mengen können im Hausmüll deponiert werden.

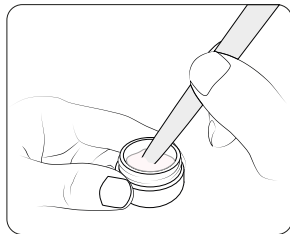

Mit einem metallfreien Spatel gut aufrühren.

🔥 Brenntabelle

Glasurbrand InSync MiYO Glasurpaste*	
Starttemperatur [°C]	400 - 450
Trockenzeit [min]	3
Schließzeit [min]	4
Heizrate [°C / min]	45
Haltezeit 1 [s]	30 - 45
Vakuum Start [°C]	580
Endtemperatur [°C]	710 - 720
Vakuum Ende [°C]	710 - 720
Haltezeit 2 [s]	30 - 60
Öffnungszeit [min]	1

* Die Brenntemperaturen sind Richtwerte und können je nach Ofentyp variieren.

📄 Downloads

Weitere Dokumente zum Download finden Sie unter:
www.jensendental.de/downloads



🛒 Webshop

24/7 können Sie in unserem Webshop bestellen.
<https://shop.jensendental.de/>



💬 Support

Allgemeine Anfragen:
info@jensendental.de
+49 7123 92260
Technischer Support:
support@jensendental.de

