


- ! Die nachfolgenden Brenntemperaturen sind Richtwerte und können je nach Ofentyp variieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zur Brandführung. Wir empfehlen grundsätzlich, soweit konstruktionsbedingt möglich, beim letzten Brand (Glasur- und Malfarbenbrand) eine Entspannungskühlung von 6 Minuten bis zur Bereitschaftstemperatur durchzuführen.

#### Brennparameter

	Start-temperatur [°C]	Trocken-zeit [min]	Schließ-zeit [min]	Heiz-rate [°C / min]	Haltezeit 1 [s]	Vakuum Start [°C]	End-temperatur [°C]	Vakuum Ende [°C]	Halte-zeit 2 [min]	Öffnungs-zeit [min]
1. Dentinbrand	450	2	4	40	45	550	765	765	1	2
2. Dentinbrand	450	2	4	40	45	550	760	760	1	2

#### Brandführung

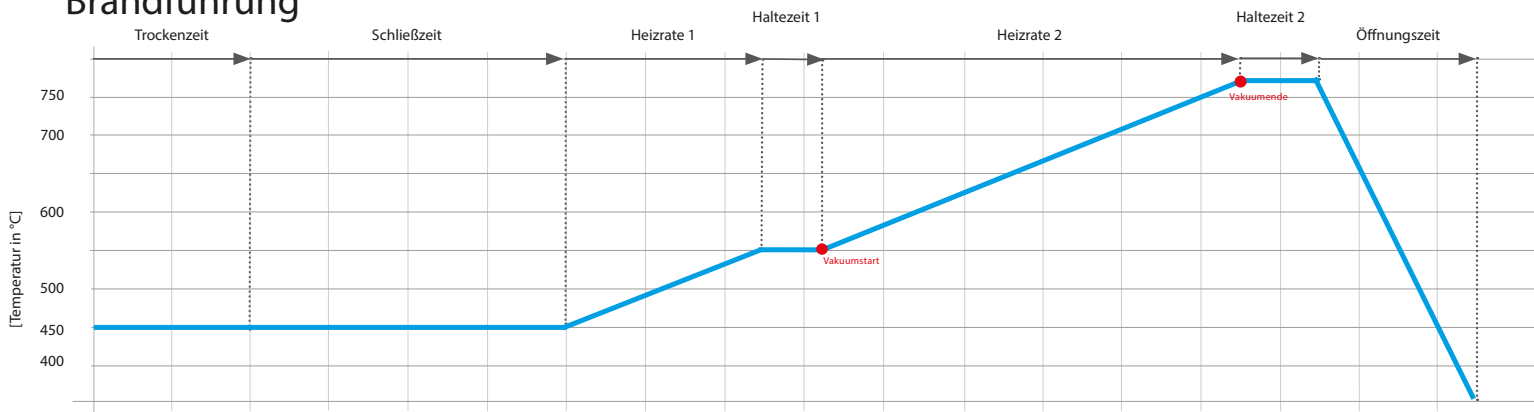

#### Ofenprogrammierung für Dekema

1. Dentinbrand	C450	T240	T120.L9	T040.C550	T45	V9	T040.C765	V0	T60	C0	L0	T2	C450
2. Dentinbrand	C450	T240	T120.L9	T040.C550	T45	V9	T040.C760	V0	T60	C0	L0	T2	C450

#### Ofenprogrammierung für Ivoclar

Vor dem Start in Optionen 2-Stufiges Programm aktivieren!

1. Dentinbrand							
S: 6:00	t1: 40	T1: 550	H1: 0:45	V1/1: 0	V2/1: 0		Stufe 1
weiter zu Stufe 2							
t2: 40	T2: 765	H2: 1:00	V1/2: 550	V2/2: 764	L: 0	tL: 0	Stufe 2


2. Dentinbrand							
S: 6:00	t1: 40	T1: 550	H1: 1:00	V1/1: 0	V2/1: 0		Stufe 1
weiter zu Stufe 2							
t2: 40	T2: 760	H2: 1:00	V1/2: 550	V2/2: 759	L: 0	tL: 0	Stufe 2

- ! Die nachfolgenden Brenntemperaturen sind Richtwerte und können je nach Ofentyp variieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zur Brandführung. Wir empfehlen grundsätzlich, soweit konstruktionsbedingt möglich, beim letzten Brand (Glasur- und Malfarbenbrand) eine Entspannungskühlung von 6 Minuten bis zur Bereitschaftstemperatur durchzuführen.

## Brennparameter

	Start-temperatur [°C]	Trocken-zeit [min]	Schließ-zeit [min]	Heiz-rate [°C / min]	Haltezeit 1 [s]	Vakuum Start [°C]	End-temperatur [°C]	Vakuum Ende [°C]	Halte-zeit 2 [min]	Öffnungs-zeit [min]
1. Dentinbrand	450	3	4	60	60	550	880	880	1	2
2. Dentinbrand	450	3	4	60	60	550	870	870	1	2

## Brandführung

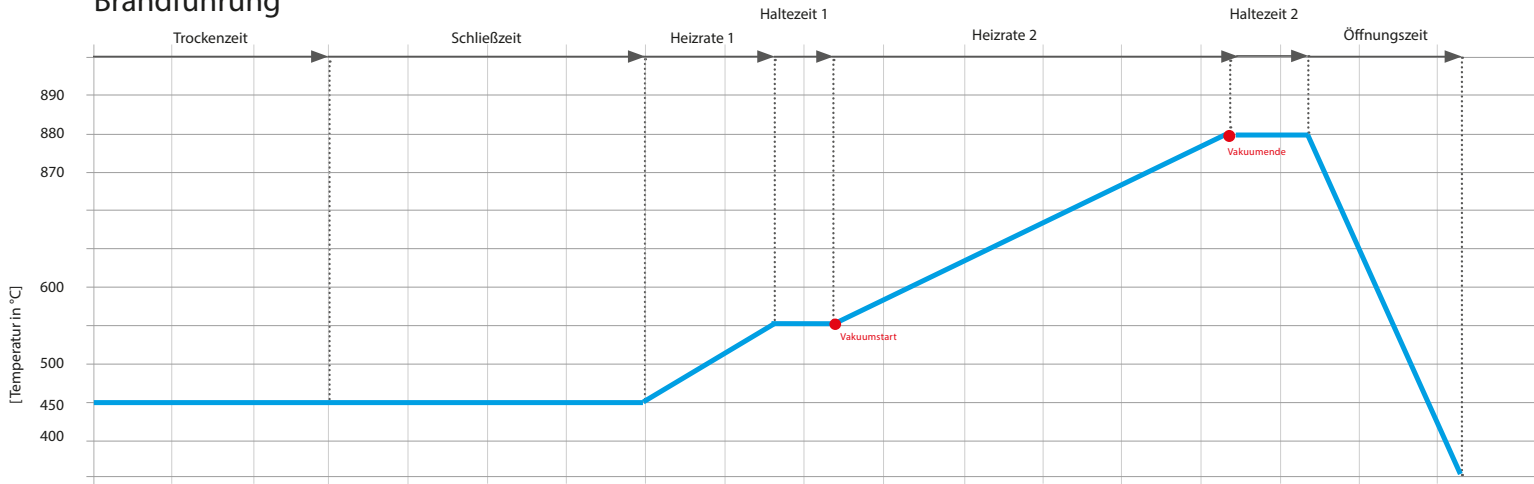

## Ofenprogrammierung für Dekema

1. Dentinbrand	C450	T240	T180.L9	T060.C550	T60	V9	T060.C880	V0	T60	C0	L0	T2	C450
2. Dentinbrand	C450	T240	T180.L9	T060.C550	T60	V9	T060.C870	V0	T60	C0	L0	T2	C450

## Ofenprogrammierung für Ivoclar

Vor dem Start in Optionen 2-Stufiges Programm aktivieren!

1. Dentinbrand							
S: 6:00	t1: 60	T1: 550	H1: 1:00	V1/1: 0	V2/1:0		Stufe 1
weiter zu Stufe 2							
t2: 60	T2: 880	H2:1:00	V1/2: 550	V2/2: 879	L: 0	tL: 0	Stufe 2

2. Dentinbrand							
S: 7:00	t1: 60	T1: 550	H1: 1:00	V1/1: 0	V2/1:0		Stufe 1
weiter zu Stufe 2							
t2: 60	T2: 870	H2: 1:00	V1/2: 550	V2/2: 869	L: 0	tL: 0	Stufe 2